


Vejledning i opdatering af Contour USB

- Gå ind på siden www.bayercontourusb.dk
Klik på "Find svaret her" (nederst midt på siden)
Klik på "Hent opdatering nu"

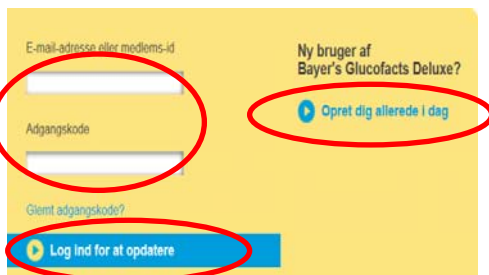



- Er du oprettet som bruger, indtastes email og adgangskode
- Er du ny bruger? Vælg "Opret dig allerede i dag" – følg nu instrukser på skærmen
- Klik på "Log ind for at opdatere"




- Vælg "Windows" og "Download nu"





- Vælg "Kør" – der dukker eventuelt en sikkerhedsadvarsel op, vælg da igen "Kør"

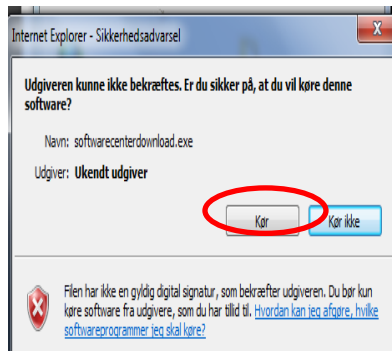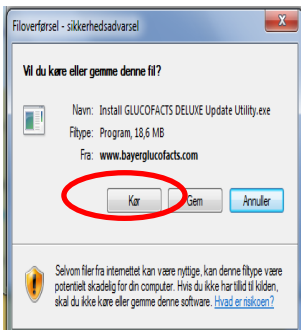

- På skrivebordet er der nu tilføjet et ikon
- Sæt din Contour USB i computeren og tryk på ikonet

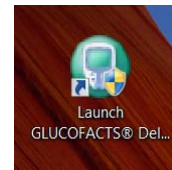

- Hvis nedenstående boks popper op, vælg "Afbryd" og tag Contour USB ud og sæt den ind igen, popper den op igen, vælg da "OK" og opdateringen går i gang, som vist herunder:

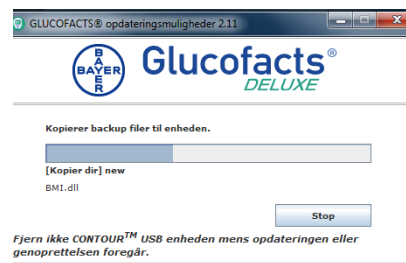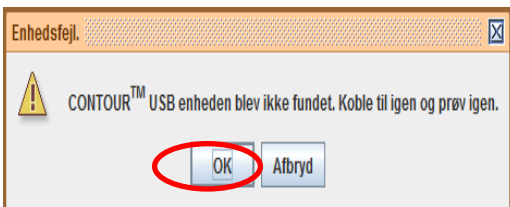

- Efter endt opdatering popper nedenstående boks op på skærmen, tryk "OK" og din Contour USB er nu opdateret 😊



God fornøjelse med din Contour USB




Til brugere med Windows 7



- En boks nær poceslinjen dukker op
- Vælg "Kør"



- En ny teksboks kommer frem
- Vælg "Handlinger"

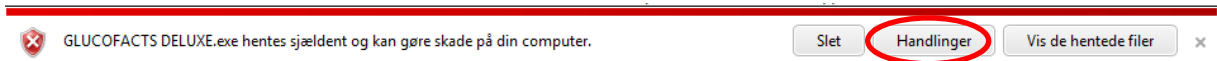

- Programmet vil ikke skade din computer.
- Vælg "Flere indstillinger" og dernæst "Kør alligevel"

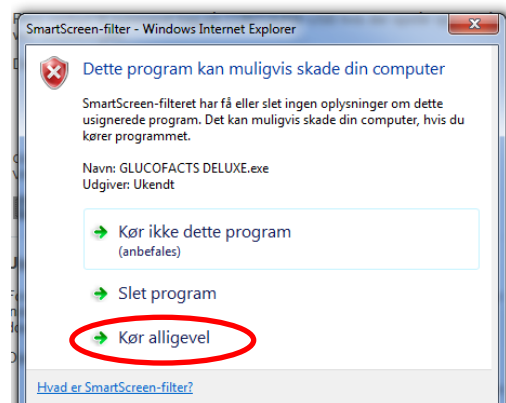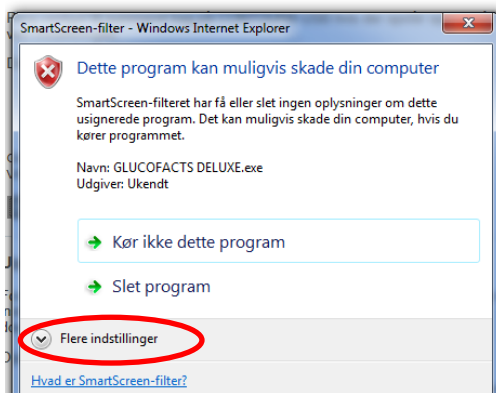

Du skal muligvis give din tilladelse til at programmet installeres igen.