

Vejledning til installation af blåt USB-kabel og Glucofacts Deluxe



Installation af Cd-rom til blåt USB-kabel

- Sæt det blå kabel i computeren
- Lad computeren finde den nye hardware
- Sæt medfølgende Cd-rom i drevet og følg vejledning på skærm
- Hvis det ikke lykkedes at installere Cd, følg da nedenstående vejledning



- Vælg START (1)
- Vælg KONTROLPANEL (2)

- Afhængig af din pc-version, vælg da én af disse muligheder (se billede næste side)

Windows 7/ 10/ VISTA:


- Vælg SYSTEM OG SIKKERHED (3)
- Vælg SYSTEM

Windows XP:


- Vælg SYSTEM
- Vælg HARDWARE




- Hvis du ikke har nedenstående opsætning kan du i rullegardinet vælge små ikoner (☺).

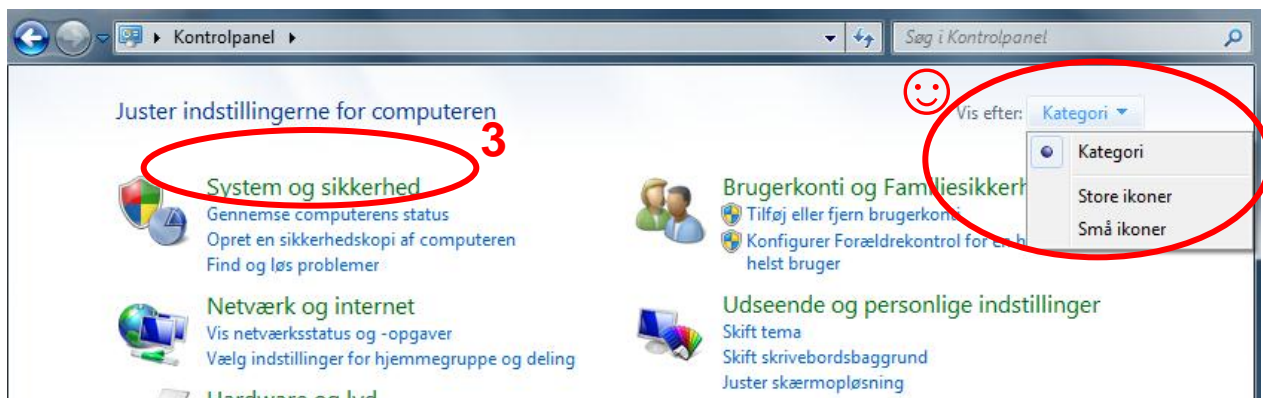


- Vælg ENHEDSHÅNTERING (4)
- Dobbelt klik på linjen med "USB Serial Cable" (5)

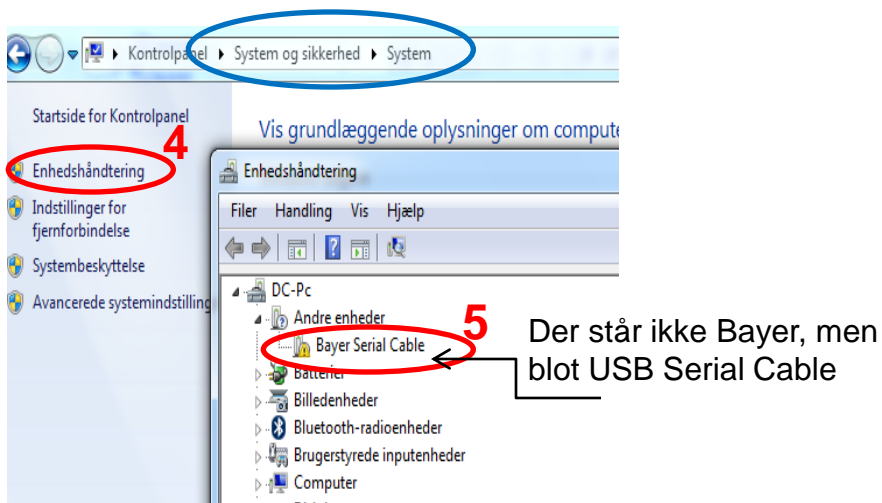

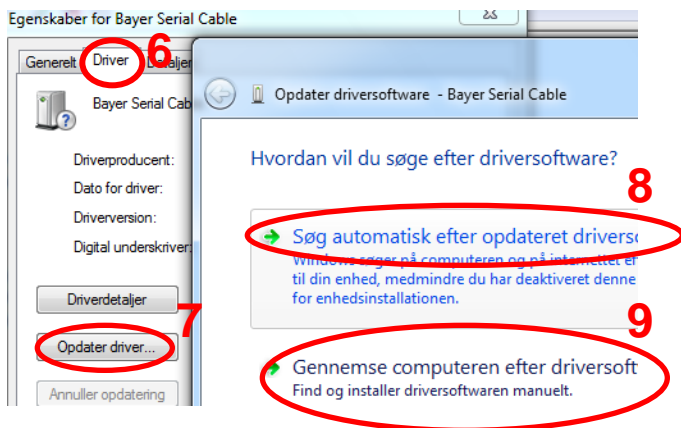

- Vælg fanbladet DRIVER (6)
- Vælg OPDATER DRIVER (7)
- Sæt medfølgende Cd i diskdrevet
- Vælg SØG AUTOMATISK... (8)
- Hvis den **ikke** kan finde Cd automatisk, så
- Vælg GENNEMSE COMP... (9) og fortsæt med punkt (10)

Gennemse computeren efter driversoftware

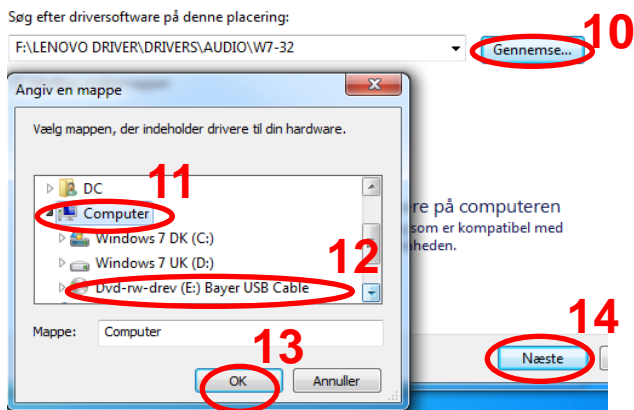

- Vælg GENNEMSE (10)
- Klik på COMPUTER (11)
- Vælg drev med BAYER USB CABLE (12)
- Tryk OK (13)
- Tryk NÆSTE (14)
- Gentag ovenstående
- Genstart din computer


Check om det blå datakabel er installeret korrekt:


- Sæt det blå kabel i computeren
- Gå i START
- Vælg KONTROLPANEL
- Vælg SYSTEM
- Vælg HARDWARE (gælder kun XP)
- Vælg ENHEDSHÅNDTERING / DEVICE MANAGER
- Klik på "+" udfor PORTS (COM OG LPT)
- Står der "Bayers USB.....(com et eller andet)" så er alt ok



Installation af dataprogrammet GlucoFacts Deluxe

- Gå ind på Bayers hjemmeside www.bayerglucofacts.com
- Vælg EUROPA (1)

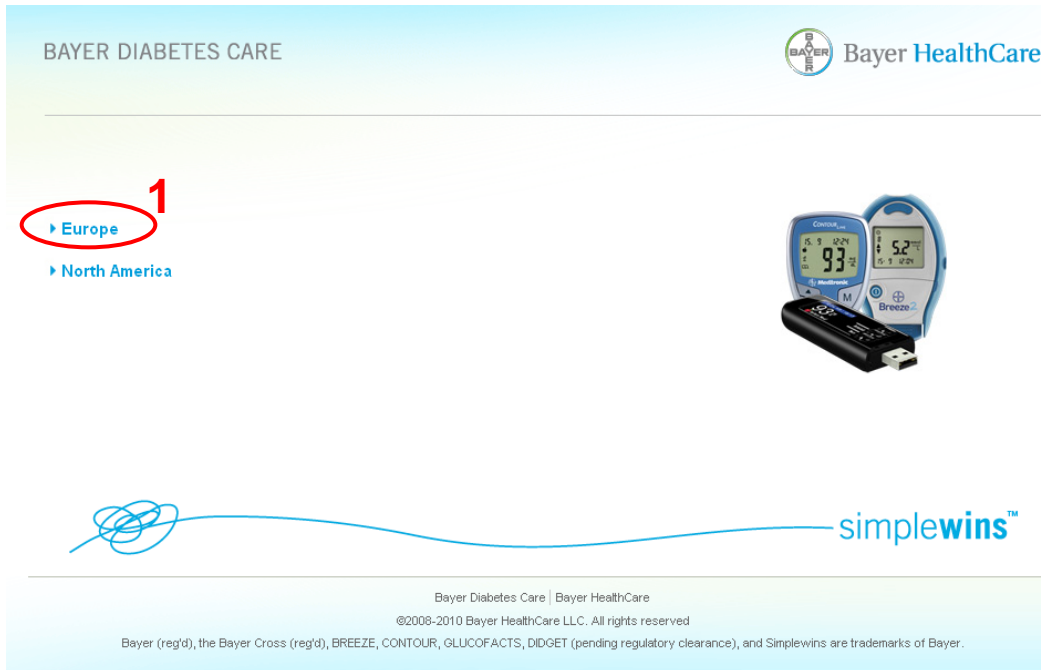


BAYER DIABETES CARE 

1

▶ Europe


▶ North America



simplewins™

Bayer Diabetes Care | Bayer HealthCare
©2008-2010 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved
Bayer (reg'd), the Bayer Cross (reg'd), BREEZE, CONTOUR, GLUCOFACTS, DIDGET (pending regulatory clearance), and Simplewins are trademarks of Bayer.

- Vælg DENMARK (2)

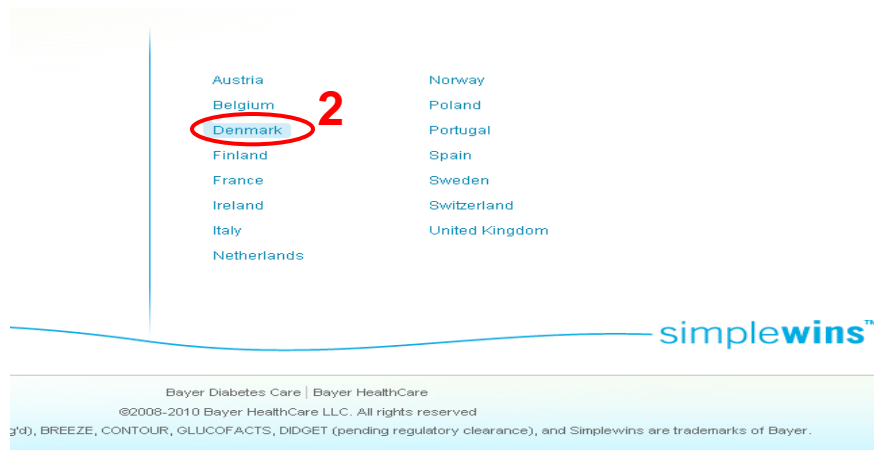

Austria

Belgium

2

Denmark

Finland

France

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

simplewins™

Bayer Diabetes Care | Bayer HealthCare
©2008-2010 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved
Bayer (reg'd), BREEZE, CONTOUR, GLUCOFACTS, DIDGET (pending regulatory clearance), and Simplewins are trademarks of Bayer.

• Vælg **DOWNLOAD NU (3)**

BAYER DIABETES CARE

Bayer HealthCare
Kontakt os | Sitemap

HJEM VORES PRODUKTER LOGIN

Glucocfacts
DELUXE

- Bayers Diabetes Management Software kan bruges med apparatfamilierne CONTOUR® og BREEZE® samt fremtidige apparater fra Bayer!
- En enkel download, installer, og du kan gå i gang.
- Databasen giver dig mulighed for at gemme apparatets resultater på din computer og håndtere dataene.
- Med en simpel USB-grænseflade registrerer GLUCOFACTS Deluxe dit apparat og henter data, displayindstillinger og mærkninger.
- Konfigurerbare dele og brugerdefinerede blodsukkergrænser
- Letforståelige diagrammer og grafer
- Vis, udskriv, og opret PDF-rapporter

FLERE OPLYSNINGER **DOWNLOAD NU** 3

• Klik på ”ER DU NY BRUGER? KLIK HER FOR AT OPRETTE NY KONTO” (4)

HJEM VORES PRODUKTER LOGIN

Bayers GLUCOFACTS® DELUXE-software

Login

Bemærk: Du skal bruge et kabel fra Bayer til at downloade målinger fra dit apparat og bruge GLUCOFACTS Deluxe (ikke nødvendig til Contour USB). Hvis du ikke allerede har et kabel, kan du [klikke her](#) for at få at vide, hvordan du bestiller et.

E-mail-adresse:

Adgangskode:

Login

Er du ny bruger? Klik her for at downloade 4

[Har du glemt din adgangskode?](#)

[Har du glemt dit brugernavn?](#)

simplewins™

- En lang tekst dukker op, scroll ned og sæt ✓ udfor GODKEND og evt. VALGFRIT...
- Tryk GODKEND (5)

identificerbare oplysninger, du har givet til Bayer, medmindre de er bearbejdet, så de ikke kan anvendes til at identificere dig eller andre enkeltpersoner.

SAMTYKKE TIL INDSAMLING, BEHANDLING OG OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OG ACCEPT AF VILKÅR OG BETINGELSER I SLUTBRUGERLICENSAFTALEN

Virksomhederne i Bayer-koncernen samarbejder om at give mennesker over hele verden helbredsrelaterede produkter og tjenester. Ved at klikke på knappen "GODKEND" herunder giver jeg mit samtykke til, at Bayer kan behandle personligt identificerbare oplysninger om mig i henhold til de vilkår angivet i nærværende meddelelse, hvilket inkluderer følsomme helbredsrelaterede og/eller lægelige oplysninger. Jeg er klar over, at jeg kan tilbagekalde denne tilladelse når som helst ved at kontakte [Vælg fra på www.bayerglucofacts.com](http://www.bayerglucofacts.com).

Ved at klikke på knappen "ACCEPTER" herunder accepterer jeg de vilkår og betingelser, der findes i [SLUTBRUGERLICENSAFTALE](#).

GODKEND

VALGFRIT SAMTYKKE TIL AT MODTAGE MARKEDSFØRINGSMATERIALE FRA BAYER

- Jeg vil gerne modtage materiale fra Bayer vedrørende sundhedsprodukter og -tjenester, og jeg giver tilladelse til brug af mine personlige oplysninger til dette formål. Jeg forstår, at jeg kan tilbagekalde denne tilladelse når som helst ved at kontakte [Vælg fra på www.bayerglucofacts.com](http://www.bayerglucofacts.com).

Godkend Afsk

- Udfyld alle felter mærket med en rød prik og tryk FORTSÆT
- Følg derefter anvisningerne på skærmen

Bayers GLUCOFACTS® DELUXE-software

Registrering

Udfyld følgende registreringskema

-Punkter mærket med en * er obligatoriske


Bemærk: Den e-mail-adresse, du angiver, bliver brugt til at sende dig den adgangskode, du skal bruge til at downloade programmet med.

Fornavn	<input type="text"/>	*
Efternavn	<input type="text"/>	*
Adresse 1	<input type="text"/>	*
Adresse 2	<input type="text"/>	
By	<input type="text"/>	*
State/Province	<input type="text"/>	*
Postnummer	<input type="text"/>	*
Land	Denmark	*
Telefonnummer	<input type="text"/>	*
E-mail-adresse	<input type="text"/>	*
Gentag e-mail-adresse	<input type="text"/>	*

NB: Password fra medlemsklubben er ikke det samme, som gælder til denne registrering.



- Til slut dukker en boks op på skærmen – indtast tilsendte kode og tryk SEND (6)

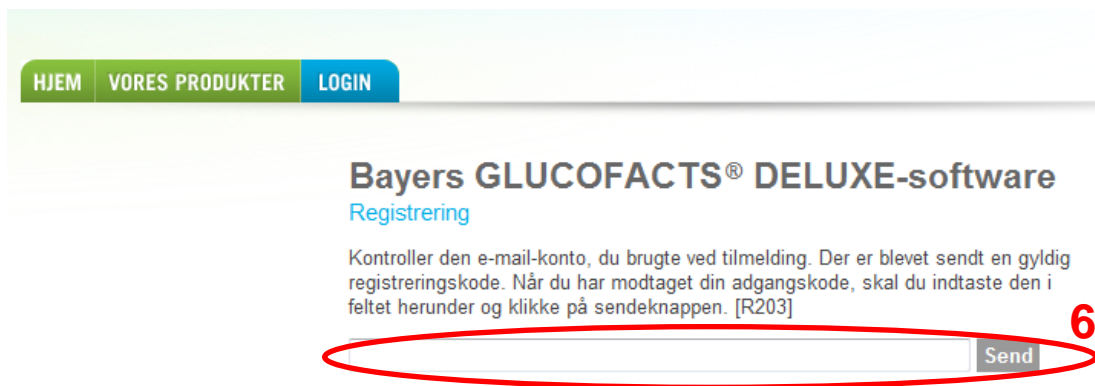

- Derefter fremkommer nedenstående skærmbillede
- Tryk nu på **KLIC HER FOR INSTRUKTIONER OG FOR AT DOWNLOADE** (7)
- Følg de videre instrutioner på skærmen

